

Indstilling af ovn

Klokken er 11:00 og vi skal indstille ovnen til hvornår den skal starte. Se punkterne **A-E**.

Vi skal støbe næste dag klokken 09:00.

Temperaturen stiger 10° C pr. minut og oven skal stige til 250° C med en holdetid på 30 minutter.

Det vil tage 25 minutter for oven at komme fra 0° C til 250° C.

Man siger at for hver kyvette der sættes i ovnen forlænges holdetiden med 10 min.

Vi har 3 kyvetter og skal derfor have holdetid i 30 min.

Derefter skal temperaturen stige fra 250° C til 700° C og holde denne temperatur i 30 minutter.

Dette tager 45 min. Det tager i alt ovnen 2 timer og 17 minutter at brænde, hvorefter vi kan støbe.

Støbeapparatet skal tændes ca. 10 – 15 min. Før brug og indstilles 1200° C ifølge Talmi 's produktblad

Ovnen skal indstilles således som vist herunder:


A: Start tidspunkt indstilles til 19 timer 43 min. Ovnen starter kl.: 06:43

B: Holde temperatur 250° C

C: Holdetid: 30 min.

D: 700° C

E: Holdetid: 30 min.

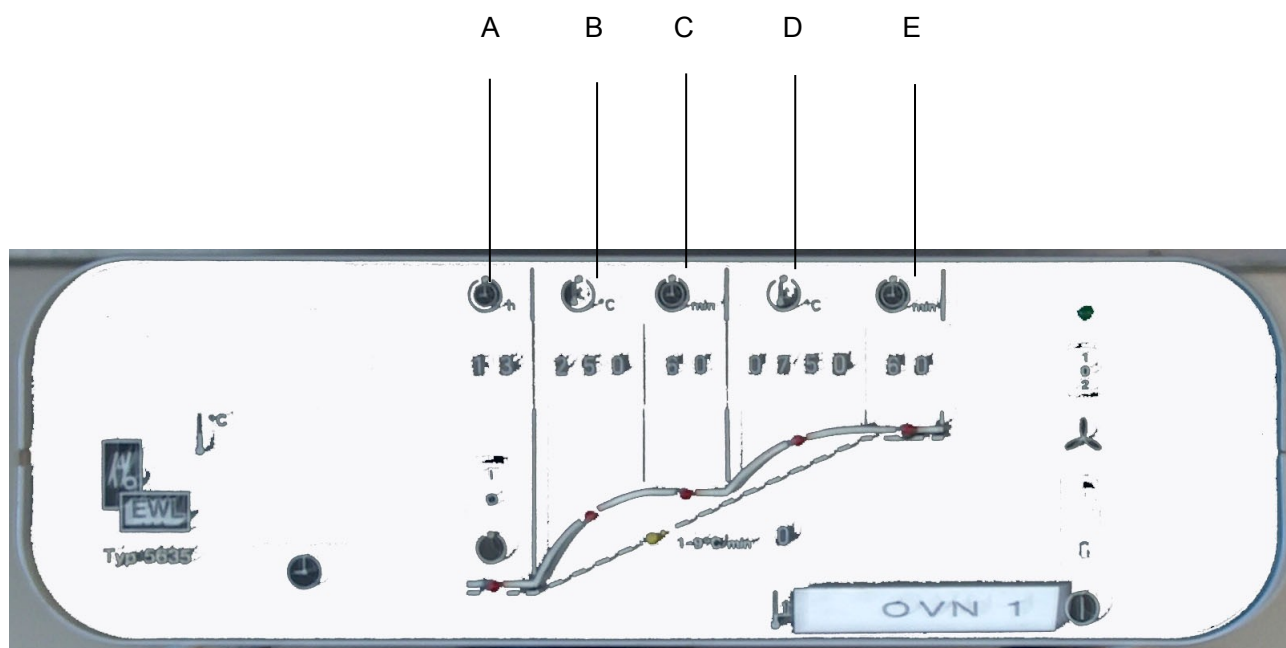

Udarbejdet af tandtekniker: Jens Erik Rex Nissen E-mail: jensmail@pc.dk